

クラリファイド® プラス 血液サンプルの採取方法



血液サンプルは血液カードを使用して採材します。

- 注意**
- 必ず手を清潔な状態に保つか、清潔な手袋を使用してください。
 - それぞれの個体に必ず新しい注射針(注射筒を使用する場合は、新しい注射筒)を使用してください。
複数のDNAが検出されてしまうと検査ができません。

STEP1 検査対象牛の個体識別番号を血液カードに記載します。



STEP2 各個体毎に新しい針を使用して耳の静脈を刺します。
血液が出たら血液カードを開き、
血液塗布部に十分な量の血液(2~3滴)を塗布します。



STEP3 血液カードを折り曲げ、血液サンプルが乾燥するようにします。
(約1時間)
血液塗布部には触らないでください。
紫外線はDNAを破壊しますので、直射日光は避けてください。



STEP4 血液が乾燥したら10~15検体をまとめて輪ゴムで固定し、
プラスチック製の袋に封入してから検体を送付してください。



検体送付先

Zoetis Genetics

333 Portage Road, Building 300 · Kalamazoo, Michigan 49007-9970
Phone : 877-233-3362 · Fax : 269-833-4711

ゾエティス・ジャパン株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-22-7

お問い合わせは下記までお願いいたします。
TEL.03-5309-7283

zoetis®